

一次性使用硅胶导尿管使用说明书

【生产许可证编号】：苏药监械生产许 20240050 号

【注册证编号】：苏械注准 20242140213

【产品技术要求编号】：苏械注准 20242140213

● 产品性能结构及组成

一次性使用硅胶导尿管由导管前端、侧孔、管身、锥形接口、球囊（选配）、单向阀（选配）、腔塞（选配）、显影线（选配）、支撑导丝（选配）组成，单腔导尿管由导管前端、侧孔、管身及排泄锥形接口组成；双腔导尿管由导管前端、侧孔、球囊、管身、排泄锥形接口、充起锥型接口和单向阀组成；三腔导尿管由导管前端、侧孔、球囊、管身、排泄锥形接口、充起锥型接口、单向阀和冲洗锥型接口（选配腔塞）组成；造影线、支撑导丝可选配；按管腔型号不同可分为单腔、双腔、三腔，按外径规格不同分为 6Fr（2.0mm）、8Fr（2.7mm）、10Fr（3.3mm）、12Fr（4.0mm）、14Fr（4.7mm）、16Fr（5.3mm）、18Fr（6.0mm）、20Fr（6.7mm）、22Fr（7.3mm）、24Fr（8.0mm）、26Fr（8.7mm）。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

● 规格型号

按腔道类型分为：单腔、双腔、三腔

按外径尺寸分为：6Fr（2.0mm）、8Fr（2.7mm）、10Fr（3.3mm）、12Fr（4.0mm）、14Fr（4.7mm）、16Fr（5.3mm）、18Fr（6.0mm）、20Fr（6.7mm）、22Fr（7.3mm）、24Fr（8.0mm）、26Fr（8.7mm）。

● 适用范围

供临床导尿用。

● 使用方法

1. 将导尿管的包装打开，取出导尿管，按照操作规程，首先对导尿管的管身及气囊进行检查；
2. 使用适量的润滑剂将导尿管涂抹均匀；
3. 让患者采取舒适的姿势，通常是仰卧位；
4. 使用清洁棉球或纱布将患者的尿道口清洁干净；
5. 用一手将患者的尿道口轻轻撑开；
6. 另一手将涂抹了润滑剂的导尿管插入尿道口，推进约 5-7 厘米，直到尿液开始流出，握住阀门外套，用注射器插入阀门内，注入额定的无菌水，使球囊充盈卡住膀胱口；
7. 插入导尿管后，将导尿管与尿袋连接，确保连接处密封良好；
8. 将尿袋挂在患者床边，确保尿液能够畅通无阻流入尿袋；
9. 患者拔出导尿管前，应先将导尿管放置在床边接收尿液；
10. 患者需保持放松，用干净的棉球轻轻拍打尿道口，以减少拔出时的不适；
11. 患者用力尿液排空后，迅速拔出导尿管，根据情况使用消毒纱布压迫尿道口，防止血迹外渗；
12. 拔出导尿管后，观察患者有无排尿困难、疼痛等情况，必要时就医。

● 禁忌症

临床对硅橡胶产品材料过敏者、尿道炎症严重者禁用。

● 注意事项、警示以及提示的内容

1. 本产品采用环氧乙烷灭菌，使用前应注意检查产品包装是否完好。
2. 应按操作规程进行操作，穿刺时应动作轻柔，并适当在导管上加润滑油，以减少对患者尿道的损伤，使用中应按照无菌操作规程。
3. 产品留置期间应加强护理，硅胶型单根产品留置时间应不得超过 30 天，以减少发生感染的几率。
4. 应严格按无菌操作执行。
5. 产品经环氧乙烷灭菌，有效期二年，生产日期、生产批号、失效日期见初包装，灭菌日期见灭菌标签；

● 包装上标识的图形、符号、缩写等内容的解释



● 贮存及保管方式

产品注意不能被水润湿, 避免阳光直射, 保存于清洁的环境中。

注册人/生产企业名称: 江苏飞宇医疗器械有限公司

网址: www.feiyu-medical.com

注册人住所/地址: 扬州市广陵区头桥镇兴达路 8 号

邮箱: feiyu@feiyu-medical.com

生产地址: 扬州市广陵区头桥镇兴达路 8 号

邮编: 225108

售后服务单位: 江苏飞宇医疗器械有限公司

联系电话: 0514-87268077 0514-87265066

编制日期 2022 年 11 月 29 日